

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PENGOPERASIAN PESAWAT USG (ULTRASONOGRAFI) ACUSON X-300		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 42/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara pengoperasian/ penggunaan pesawat USG Acuson X-300 agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pengoperasian pesawat agar terhindar dari kesalahan prosedur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<p>Prosedur menghidupkan pesawat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel <i>power</i> dengan stop kontak. (Gunakan UPS atau Stabilizer untuk melindungi mesin dari arus/ tegangan listrik yang merusak) 2. Pindahkan posisi tombol <i>power</i> yang terletak di bagian bawah belakang dari mesin ke posisi "ON" 3. Setelah tombol <i>power</i> pertama dinyalakan, maka tombol <i>power</i> yang terletak di bagian control panel akan menyala. Tekan tombol tersebut untuk menyalakan mesin. 4. Pesawat USG telah siap untuk dioperasikan untuk pemeriksaan. <p>Prosedur Mematikan pesawat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan semua data-data yang penting sudah tersimpan di hard disk/ media penyimpanan data lainnya. 2. Tekan tombol <i>power</i> yang ada di <i>Control panel</i>. 3. Pada layar akan muncul kotak dialog untuk memastikan bahwa alat akan dimatikan. Arahkan kursor dengan menggunakan track ball ke kotak Yes, kemudian tekan Enter. 4. Tunggu hingga tombol <i>power</i> yang terletak di <i>Control panel</i> menjadi berwarna kuning. 5. Matikan tombol <i>power</i> yang terletak di bagian bawah belakang mesin. 6. Matikan UPS/ Stabilizer. 7. Cabut kabel dari stop kontak. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		