

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PERAWATAN RUTIN PESAWAT GENERAL MEDICAL MERATE MOBILE (GMM)		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 43/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara perawatan pesawat general medical merate mobile (GMM) agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat. Perawatan secara teratur akan memperpanjang umur pemakaian dan mengurangi servis yang tidak perlu.		
TUJUAN	Sebagai pedoman saat melakukan perawatan rutin pesawat general medical merate mobile (GMM) agar terhindar dari kesalahan prosedur.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan debu, tumpahan cairan dari pasien maupun kontras pada pesawat dengan cairan pembersih yang sudah disiapkan dan di lap dengan kain lembut hingga kering. 2. Olesi bagian yang bergerak seperti engsel lengan, roda penggerak dengan menggunakan pelumas. 3. Cek kondisi pesawat secara umum, pastikan tidak ada kerusakan dan baut yang kendur/ lepas. 4. Cek kabel penghubung dengan stop kontak PLN, pastikan tidak ada yang lecet. 5. Kabel tidak boleh terinjak roda pesawat rontgen mobile. 6. Nyalakan pesawat, ekspos satu kali untuk mengecek kondisi pesawat. 7. Apabila semua dalam kondisi baik, pesawat rontgen siap digunakan untuk pemeriksaan. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		