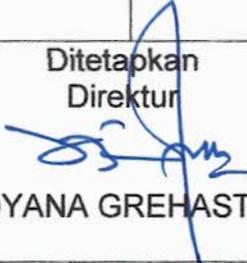


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PERAWATAN RUTIN PESAWAT USG (ULTRASONOGRAFI) ACUSON X-300		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 45/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara perawatan pesawat USG Acuson X-300 agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat. Perawatan secara teratur akan memperpanjang umur pemakaian dan mengurangi servis yang tidak perlu.		
TUJUAN	Sebagai pedoman saat perawatan pesawat agar terhindar dari kesalahan prosedur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	Cara Membersihkan Trackball : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka cincin di sekitar trackball dengan menggunakan jari. 2. Angkat trackball keluar dari area pemasangan. 3. Bersihkan trackball dan area pemasangan dengan kain lembut bebas serabut atau sikat halus yang kecil. 4. Letakan kembali bola pada area pemasangan. 5. Pasang kembali ring dengan jari anda. Cara Perawatan Transducer : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transducer</i> harus dibersihkan setelah digunakan. 2. Gunakan tisu dengan permukaan yang lembut atau kain dengan permukaan yang lembut untuk membersihkan. 3. Apabila permukaan <i>transducer</i> terdapat jeli yang berkerak, oleskan jeli yang baru pada tempat yang berkerak lalu dibersihkan. 4. Jangan menggunakan cairan yang mengandung alkohol, karena bisa menyebabkan warna probe menjadi kuning. 5. Bersihkan secara teratur agar mengurangi servis yang tidak perlu. Cara Mengganti Transducer saat melakukan pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ingin mengganti transducer pada saat pemeriksaan berlangsung, usahakan USG pada saat <i>Freeze</i>. 2. Tekan <i>Freeze</i>. 3. Lalu ganti dengan probe yang ingin digunakan. 4. Tekan <i>Freeze</i> kembali. Kemudian tekan <i>transducer</i> dan pilih aplikasi yang akan digunakan.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		