

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PERAWATAN RUTIN PESAWAT SIEMENS MULTIX SELECT-DR		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 49/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara perawatan pesawat rontgen merek Siemens dengan tipe Multix Select DR agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat. Perawatan secara teratur akan memperpanjang umur pemakaian dan mengurangi servis yang tidak perlu.		
TUJUAN	Sebagai pedoman saat melakukan perawatan rutin pesawat rontgen merek Siemens dengan tipe Multix Select DR agar terhindar dari kesalahan prosedur.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan pendingin ruangan sesuai dengan standar pengoprasian pesawat yaitu 20-24°C. 2. Bersihkan debu, tumpahan cairan dari pasien maupun kontras pada pesawat dengan cairan pembersih yang sudah disiapkan dan di lap dengan kain lembut hingga kering. 3. Olesi bagian yang bergerak seperti engsel, roda dengan menggunakan pelumas. 4. Cek kondisi pesawat secara umum, pastikan tidak ada kerusakan dan baut yang kendur/ lepas. 5. Cek kondisi printer secara umum, pastikan tidak ada kerusakan dan sudah tersedia film sesuai dengan ukuran. 6. Nyalakan pesawat, ekspos satu kali (tanpa print out) untuk mengecek kondisi pesawat. 7. Apabila semua dalam kondisi baik, pesawat rontgen merek Siemens dengan tipe Multix Select DR siap digunakan untuk pemeriksaan. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		