

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PERAWATAN RUTIN PESAWAT PANORAMIC VILLA ROTOGRAPH EVO		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 54/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara perawatan pesawat rontgen merek Villa Sistemi Medicali dengan tipe Rotograph Evo agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat. Perawatan secara teratur akan memperpanjang umur pemakaian dan mengurangi servis yang tidak perlu.		
TUJUAN	Sebagai pedoman saat melakukan perawatan rutin pesawat rontgen merek Villa Sistemi Medicali dengan tipe Rotograph Evo agar terhindar dari kesalahan prosedur.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 47 tahun 2015 tentang assesmen pasien pada rumah sakit umum daerah Ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyalakan pendingin ruangan sesuai dengan standar pengoprasian pesawat yaitu 20-24°C. 2. Bersihkan secara rutin dari debu, tumpahan cairan dari pasien (air liur) maupun darah yang menempel pada pesawat dengan cairan pembersih yang sudah disiapkan dan di lap dengan kain lembut hingga kering. 3. Cek kondisi pesawat secara umum, pastikan rotor bisa bergerak secara normal dan tidak ada kerusakan serta baut yang kendur/ lepas. 4. Nyalakan pesawat, ekspos satu kali untuk mengecek kondisi pesawat. 5. Apabila semua dalam kondisi baik, pesawat rontgen merek Villa Sistemi Medicali dengan tipe Rotograph Evo siap digunakan untuk pemeriksaan. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		