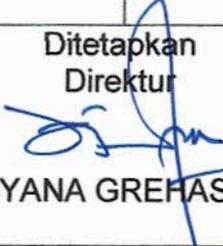


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PENGOPERASIAN ALAT AGFA CR 15-X		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 27/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Tata cara pengoperasian/ penggunaan pesawat agfa CR 15-X agar terhindar dari kesalahan prosedur dan kerusakan alat		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pengoperasian pesawat agar terhindar dari kesalahan prosedur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	Menyalakan dan mengoperasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisikan On pada UPS di kolong meja. 2. Tekan tombol on pada CPU di bawah monitor CR. 3. Setelah monitor menyala masuk ke menu Start NX Viewer yang ada pada dekstop. 4. Masukkan identitas pasien pada monitor CR di menu <i>Worklist</i> → <i>New Exam</i> 5. Masukkan jenis pemeriksaan yang diminta di menu Examination, lalu masukkan kaset yang telah di ekspose ke <i>Image Reader (scanner)</i>, untuk memindahkan gambar dari kaset ke program CR. 6. Setelah gambar digital radiograf sudah muncul di monitor CR maka masuk ke menu <i>editing</i>, untuk mengolah gambar digital menjadi lebih baik, dan melengkapi dengan keterangan-keterangan ukuran organ, marker dan lain-lain. 7. Setelah gambar dianalisa dan diolah lalu dilanjutkan dengan print out gambar ke film radiograf dengan ukuran film menyesuaikan. 8. Lepaskan kaset yang sudah terbaca dari (<i>Scanner</i>) Mematikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke <i>Main Menu</i> → <i>Exit NX</i> setelah itu tampilan monitor akan nampak seperti komputer pada umumnya. 2. Matikan pesawat CR dengan cara men "shutdown" seperti komputer pada umumnya. 3. Tekan tombol off pada UPS yang berada di kolong. 		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Radiologi		