

	PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR DASAR LUKA		
	No. Dokumen 445/04.11.198/ Rev.00/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal 20 Agustus 2024	 Direktur RSUD Banyumas Dani Esti Novia	
PENGERTIAN	Tata cara pengambilan bahan pemeriksaan kultur dasar luka pasien dari ruang IGD/ rawat inap/ rawat jalan ke Instalasi Laboratorium Patologi Klinik		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah dalam pengambilan bahan pemeriksaan kultur dasar luka yang benar untuk pemeriksaan mikrobiologi		
KEBIJAKAN	Dalam upaya melakukan pemeriksaan laboratorium patologi klinik sesuai dengan Peraturan Direktur no. 272 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium maka dibuat sop pengambilan sampel kultur dasar luka		
PROSEDUR	Pra Analitik: 1. Pengambilan bahan dilakukan sebelum penggunaan antibiotik. 2. Pengambilan bahan pada pasien yang sudah menggunakan antibiotik, dilakukan sesaat (+ 1 jam) sebelum jadwal pemberian antibiotik berikutnya. 3. Menerapkan prinsip aseptik (hand hygiene, alat pelindung diri, wadah steril). 4. Melakukan penginputan Order di SIMRS untuk pemeriksaan Kultur & Tes Kepekaan Antibiotika. 5. Satu order yang dibuat hanya dapat untuk satu pemeriksaan kultur 6. Pengisian order dilakukan dengan lengkap sesuai kolom yang telah disediakan		


	PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR DASAR LUKA		
	No. Dokumen 445/04.11.198/ Rev.00/2024	No. Revisi 00	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	7. Memberi label pada wadah /tabung: berisi data identitas (Nama, Nomor rekam medis, ruang perawatan), jam sampling, jenis bahan Analitik: 1. Melakukan aseptis daerah luka dengan NaCl fisiologis steril sampai semua debris yang menutup luka bersih. 2. Melembabkan swab dengan NaCl fisiologis steril 3. Ambil sampel dari dasar lesi/tepi luka yang meluas (Jangan ambil Pus permukaan) 4. Swab dasar luka dengan cara putar dengan lembut atau dengan pola zigzag, menggunakan beberapa swab untuk mengumpulkan eksudat dari luka (ditunggu eksudasi baru setelah permukaan luka dibersihkan maksimal). 5. Bahan dimasukkan dalam wadah steril yang telah dilabel, berisi media transport (Amies) atau NaCl fisiologis 0,5-1cc yang telah dilabel 6. Spesimen langsung dikirim ke laboratorium (tidak boleh ditunda).		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan, Instalasi rawat inap, IGD		
REFERENSI	• Basic Laboratory Procedures in Clinical Bacteriology 2nd edition World Health Organization Geneva 2003 • Procedures/Guidelines for the Microbiology Laboratory College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan Laboratory Quality Assurance Program 2010		

Lampiran.



Keterangan:

Asepsis daerah luka dengan NaCl fisiologis steril sampai semua debris yang menutup luka bersih

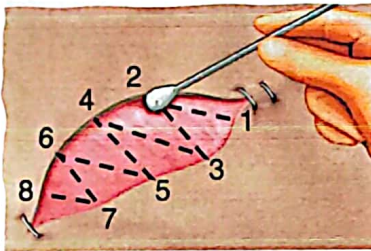

Keterangan:

Swab dasar luka dengan cara putar dengan lembut atau dengan pola zigzag, menggunakan beberapa swab untuk mengumpulkan eksudat dari luka